

אין הבטחה לכניסה להריון בעת השימוש בג'ל הפוריות
אל תשתמשי בג'ל הפוריות אם את אלרגית לכל אחד מן הרכיבים שצוינו.
אין להשתמש בג'ל הפוריות יחד עם מוצרים אחרים המיועדים לנרתיק.

אופן השימוש בג'ל?

- הוציאי את ערכת ההחדרה מעטיפת המגן שלה
- הסירי את המכסה על ידי סיבוב קל
- החדירי את הקצה החשוף של מתקן ההחדרה לנרתיק, עדיף במצב שכיבה
- לחצי לשימוש בכל תכולת הג'ל הקיימת בערכת ההחדרה, הרחיקי אותה והטילי אותה לאשפה.



ידעת שגברים הם הסיבה ל-40-50% מבעיות ההיריון, בעיקר עקב ספירת זרע נמוכה?

SpermCheck® Fertility הוא ערכה לבדיקה מהירה לשימוש ביתי המיועדת לאבחן את ריכוז תאי הזרע בזרעו של הגבר. בדיקה פשוטה זו תאפשר לך לדעת תוך דקות האם ספירת הזרע שלך היא בגבולות הנורמה.


SpermCheck® Fertility היא בדיקת ביתית מהירה שתתן לך תוצאה חיובית (ספירת זרע רגילה) או שלילית (ספירת זרע נמוכה).

קנה מוצר SpermCheck® Fertility היום וחסוך זמן ואי נעימות!

הדור הבא של בדיקת הפוריות כבר כאן!

SpermCheck
FERTILITY

- ✓ דיוק של יותר מ-98%
- ✓ נוח ודיסקרטי
- ✓ מחיר שווה לכל נפש
- ✓ מהיר – תוצאות תוך 10 דקות

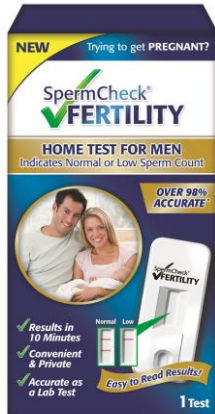

רימיפארם
מוצרים רפואיים בע"מ

FertileCheck®
FERTILITY GEL
with hyaluronic acid

הוראות שימוש ג'ל פוריות

ג'ל הפוריות הוא ג'ל שקוף עם חומצה היאלורונית, המיטיבה את מאזן הלחות הטבעית של הנרתיק. החומצה היאלורונית משפרת את כושר התנועה של הזרע, והיא מהווה רכיב פיזיולוגי של איברי הרבייה של הגבר ושל האישה כאחד. תנאים אלה מעניקים לזרע תנאים מושלמים בימי הפריה של האישה.

בנוסף, פותח ג'ל הפוריות למען נשים הסובלות מיובש בנרתיק ואשר אינן מסוגלות להסדיר את רמות הלחות באופן טבעי בעקבות מספר סיבות כגון גיל, מצבי לחץ ומצב בריאותי כללי. תסמינים אלה צצים כתוצאה מנסיבות שונות, במיוחד במצבי לחץ נפשי.

מתי משתמשים בג'ל הפוריות?

ג'ל הלחות מעניק לחות והוא משמש כחומר סיכה, במיוחד בתקופת הפריה כאשר אין להשתמש בחומרי סיכה אחרים. חומרי סיכה רגילים רבים משמשים גם כקוטלי זרע ולכן הם אינם מתאימים לאישה המנסה להרות. ערכת ההחדרה היא נוחה לשימוש ואפשר לקחת אותה בדיסקרטיות בתיק יד. כל ערכה אטומה בעטיפת מגן השומרת על ההיגיינה שלה בכל עת.

באיזו תדירות אפשר להשתמש בג'ל הפוריות?

בגלל הנוסחה העדינה במיוחד והטבעית שלו אפשר להשתמש בג'ל הפוריות מדי יום.

מה עוד חשוב לדעת כאשר משתמשים בג'ל הפוריות?

יש לקיים את הקשר המיני המתוכנן תוך 15 דקות מרגע השימוש בג'ל. ג'ל הפוריות אינו מכיל כל הורמונים. פני לייעוץ אצל רופא אם ההיריון לא התרחש תוך 12 חודשים בקרב בנות גילאים עד 35 שנה ותוך 6 חודשים בקרב נשים מעל גיל 35 שנה.

רימיפארם

מוצרים רפואיים בע"מ

ת.ד. 10186, תל-אביב 61101

טל: 03-6483635 www.rimipharm.co.il

יצרן: Medena AG, Switzerland
מאדאנה AG, שווייץ